

3d STRAŽIŠAR d.o.o.

Vnanje gorice, Pot k čuvajnici 6, PE: Podpeška cesta 174, 1351 Brezovica pri Lj. /tel: 01 365 14 50/
fax: 01 363 40 22/ e mail: info@strazisar.si / www.strazisar.si

Ukrepi za zagotovitev boljše kvalitete vode v zobnih strojih:

1. Odklop grelca vode za instrumente, če stroka to dovoljuje.
2. Odklop grelca vode v kozarec za izplakovanje, če stroka to dovoljuje.
3. Menjava originalnega vodnega filtra v stroju.
4. Montaža dodatnih zunanjih filtrov ob stroju ali drugje na objektu.
5. Priklop naprave s katero v zobozdravstveni stroj pošljemo dezinfekcijsko sredstvo na osnovi peroksida, ki odlušči biofilm iz vodnih cevi.
Celotni postopek se izvede kot servisni poseg in traja 2,5 do 3 ure.
Po potrebi lahko serviser poseg večkrat ponavlja, npr. vsak mesec.
Po posegu se stroj priklopi nazaj na vodovodno omrežje
6. Priklop naprave s katero v zobozdravstveni stroj dvakrat pošljemo dezinfekcijsko sredstvo, ki raztaplja biofilm.
Sredstvo iz 3 komponent in dodatno sredstvo iz 2 komponent.
Postopek se izvede kot servisni poseg in traja 4 do 5 ur.
Po potrebi lahko serviser poseg večkrat ponavlja, npr. vsak mesec.
Po posegu se stroj priklopi nazaj na vodovodno omrežje.
7. Odklop linije za vodo katera je v stiku s pacientom in instaliranje originalnega seta, ki zagotavlja vodo iz 1,5 l rezervoarja (uporaba kupljene ustekleničene vode).
8. Instaliranje dezinfekcijske naprave v stroj (zagotavlja predpisano stalno prisotnost dezinfekcijskega sredstva v vodi, ki pride v stik s pacientom).
Dodatno: Set za intenzivno dezinfekcijo (osebje ordinacije lahko 1 x tedensko z večjo količino sredstva skrbi za vodno napeljavo v stroju).

Vse zgoraj opisane posege izvajamo v našem podjetju.

Ukrepi opisujejo nam trenutno poznane postopke, ki se z časom lahko nadgrajujejo.
Za več informacij smo dosegljivi na spodnjem naslovu:

3D Stražišar d.o.o.
Pot k čuvajnici 6
1351 Brezovica pri Ljubljani
tel.: 01 365 14 50 / 01 363 40 20
fax: 01 363 40 22

e mail: info@strazisar.si
splet: www.strazisar.si