

3d STRAŽIŠAR d.o.o.

Vnanje gorice, Pot k čuvajnici 6, PE: Podpeška cesta 174, 1351 Brezovica pri Lj. /tel: 01 365 14 50/
fax: 01 363 40 22/ e mail: info@strazisar.si / www.strazisar.si

VZDRŽEVANJE ZOBOZDRAVNIŠKEGA APARATA KAVO

Za vsakim pacientom: s hladno vodo izprati sesalne cevi (hydroclean funkcija)
dezinficirati zunanost uporabljenih instrumentov

Večkrat dnevno: očistiti filter v fontani,
očistiti in dezinficirati vse površine stroja

1 x dnevno: očistiti oba filtra – za sesalec in aspirator
dezinficirati sesalni in odtočni sistem s čistilom DEKASEPTOL
podmazati instrumente z KaVo sprajem

1 x tedensko: pregledati tesnila na mikromotorjih in spojkah
zagnati program intenzivne dezinfekcije vodnih poti
(če ima stroj dezinfekcijsko napravo)

1 x mesečno: pregledati posodico za odvečno olje
očistiti reflektor

1 x letno: menjati filter za vodo
letni servis, kot ga predpiše proizvajalec
dezinfekcija vodnih poti stroja

Zamenjati kontejner z zbranim odvečnim amalgamom, ko aparat javi z zvočnim signalom
Doliti OXYGENAL dezinfekcijsko sredstvo za vodo ko aparat javi z zvočnim signalom
(če ima stroj dezinfekcijsko napravo)

Za več informacij smo dosegljivi na spodnjem naslovu:

Lep pozdrav
Damijan Stražišar

3D Stražišar d.o.o.
Pot k čuvajnici 6
Vnanje Gorice
1351 Brezovica pri Ljubljani

01 365 14 50
01 363 40 20
fax:01 363 40 22
e mail: info@strazisar.si