

3d STRAŽIŠAR d.o.o.

Vnanje gorice, Pot k čuvajnici 6, PE: Podpeška cesta 174, 1351 Brezovica / tel: 01 365 14 50
info@strazisar.si / www.strazisar.si

Postopek servisiranja instrumentov

V naših servisnih prostorih instrument pred popravilom steriliziramo, razstavimo, sestavne dele očistimo v ultrazvočni banjici, jih osušimo v centrifugi, pregledamo pod mikroskopom, podmažemo, testiramo, ...

Dela izvajamo z originalnim orodjem po postopkih, ki jih predpisuje proizvajalec.

Postopek lahko vpliva na sestavne dele instrumenta.

Vedno se od razstavljanju instrumenta spremeni stanje posameznih sestavnih delov. Instrumenti so v tovarni sestavljeni zelo tesno z minimalnimi razmaki in tolerancami. Ko se instrument razstavlja dobijo sestavni deli več prostora. Lahko tudi spremenijo svoje zunanje mere ali razpadejo. (stari o-ringi in tesnila se na prostem razširijo, obrabljeni ležaji razpadejo...)

Če predvideno popravilo presega 50% vrednosti novega instrumenta, vam po elektronski pošti pošljemo predračun.

Če se za popravilo instrumenta ne odločite ga brezplačno vrnemo - razstavljenega.

Če želite, da vam instrument sestavimo računamo pavšalni znesek 20,00 + ddv.

Ker se stanje sestavnih delov pri demontaži spremeni, pa v posameznih primerih instrumenta brez novih delov ni možno povrniti v staro stanje.

Primer:

V servis smo prejeli turbino, ker je zamašena. Da očistimo vodne poti jo je potrebno razstaviti.

Dejstva:

Cevke za vodo so zamašene, tesnilo pri glavi se je izven ohišja razširilo, ležaj na rotorju je obrabljen in je izven ohišja razpadel.

Turbino očistimo, vendar jo brez vgradnje novega tesnila in novega rotorja ne moremo povrniti v funkcionalno stanje.

Zdravniku pošljemo predračun in počakamo odgovor.